



BIO JET

АППАРАТ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ
И ГАЗОЖИДКОСТНОГО ПИЛИНГА

BIO JET



MIDIS




BIO JET



Многофункциональная платформа BIO JET это уникальное сочетание методик в одном аппарате, для очищения, омоложения, тонизации и лифтинга кожи.

Основные функции BIO JET:


- Газожидкостный пилинг
- Кислородная мезотерапия
- Дермабразия
- Вакуумный массаж
- Спрей
- Микротоковая терапия
- Кислородная терапия



ГАЗО- ЖИДКОСТНЫЙ ПИЛИНГ



ГЖ пилинг основан на сочетании механического и температурного раздражителей: воды и потока воздуха, которые взаимодополняют друг друга. Процедура заключается в бесконтактной обработке кожи газожидкостной струёй. В специальной насадке с реактивным микросоплом разгоняется сжатый воздух до сверхзвуковой скорости. Внутрь насадки поступает жидкость (обычно используется изотонический раствор натрия), капли которого, попадая в скоростную струю воздуха формируют газо-жидкостный поток.



ЭФФЕКТЫ ГАЗОЖИДКОСТНОГО ПИЛИНГА

- Пилинг
- Криотерапия
- Массаж
- Очищение
- насыщение кожи кислородом
- Аквафорез (введение препаратов)



КИСЛОРОДНАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ

Как известно, у большинства людей мезотерапия ассоциируется с иглой. На сегодняшний день кислородная мезотерапия наиболее эффективная и комфортная альтернатива обычной инъекционной мезотерапии.

Такой метод введения активных веществ обладает массой преимуществ:

- Отсутствие отеков и синяков после процедуры
- Отсутствие реабилитационного периода
- Дополнительное насыщение клеток кислородом (2-ое действие препарата и кислорода)
- Введение любых низкомолекулярных коктейлей
- Комфортность процедуры
- Отсутствие противопоказаний

МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ

Микротоковая терапия предназначена для воздействия на кожные покровы, мышечную ткань и лимфатические пути человека импульсным током малого напряжения для создания стойкого тонизирующего лифтинг-эффекта, проведение лимфодренажа, повышения обменных процессов в коже и мышцах.



ДЕРМА- БРАЗИЯ

Дермабразия – это один из видов механического пилинга кожи лица, в процессе которого происходит поочередная шлифовка разных слоев дермы.

В комплектации 9 алмазных фрез разного диаметра и бразивности.



BIO JET

ВАКУУМНЫЙ МАССАЖ

Вакуумный массаж является идеальным методом для проведения процедуры лимфодренажа. Как правило: используйте вакуумный массаж перед процедурой, это даст Вам ряд преимуществ при дальнейшем проведении процедуры:

- Снимается лимфотический блок.
- Снимается ороговевший слой (это важно для инъекционной процедуры, ороговевший слой может помешать проникновению препарата в дерму)

*Выполняется гладкой насадкой

СПРЕЙ

Кислородный спрей используется для деликатного орошения препарата и активного насыщения кислородом кожи. Спрей представляет собой небольшую ручку с небольшим баллоном, в баллон заливается препарат и далее смешиваясь с кислородом подается через ручку. Спрей можно использовать как для проведения процедур демакияжа, так и как завершающую процедуру.

BIO JET

BIO JET





КИСЛОРОДНАЯ МАСКА



В завершении комплекса BIO JET позволяет провести процедуру кислородного насыщения. Для этого пациент надевает специальную маску, через которую подается кислород, и в течении определенного времени организм полностью насыщается кислородом.

КОНТАКТЫ



MIDIS Medical Dermatology Systems

www.midis-centr.ru

«Центр Медицинской Косметологии «Мидис»

Сайт: <http://www.midis-centr.ru/>


www.coolite.ru

www.contlex.ru

Телефоны: +7 (495) 925-97-51

Адрес: ул. Коштоянца 20, корпус 2, Офис №5

@MIDIS_OFFICIAL

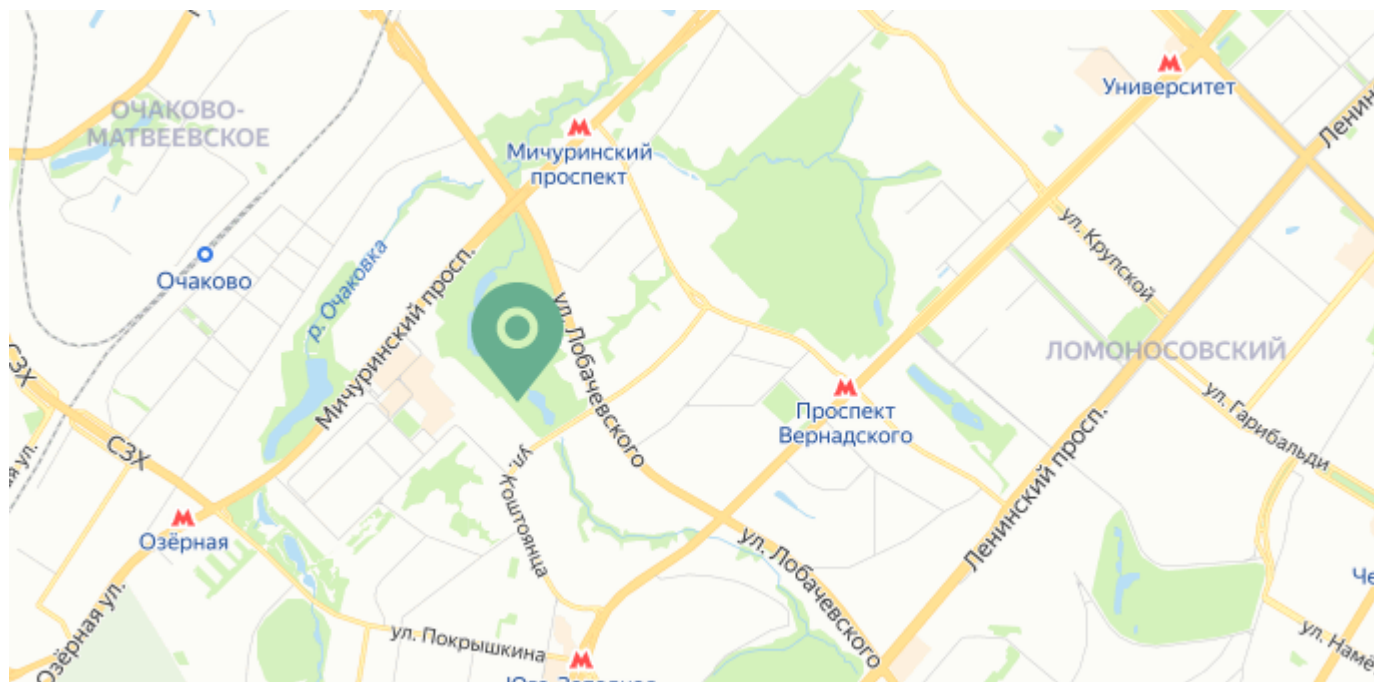

Центр МИДИС
Эксклюзивный
Дистрибьютор
Оборудования для
Салонов красоты и
Центров эстетической
Медицины

С 1991 года



ОБУЧЕНИЕ



СЕРВИС



РАССРОЧКА



ПОДДЕРЖКА