



HIFU DUAL

АППАРАТ СФОКУСИРОВАННОГО УЛЬТРАЗВУКА HIFU
ДЛЯ SMAS ЛИФТИНГА И ИНТИМНОГО ОМОЛОЖЕНИЯ

HIFU DUAL



MIDIS



HIFU DUAL

Модель HIFU DUAL это уникальный по возможностям аппарат HIFU терапии.

Аппарат предназначен для омоложения и лифтинга линии SMAS. Имеет несколько картриджей для работы по телу и коррекции фигуры.


А также 2 картриджа и вагинальную манипулу для интимного омоложения.

Аппарат может быть укомплектован картриджами с ресурсом на 10 000 линий, а также на 20 000 линий, что значительно снизит себестоимость процедуры.

КАК РАБОТАЕТ HIFU

В основе работы HIFU DUAL лежат ультразвуковые импульсы разной длины. Короткий и длинный лучи параллельно находят точку и фиксируются на ней. В этот момент на участке ткани образуется зона коагуляции (микроскопический зашип). Когда таких зашипов на SMAS-слое много, получается, что ткань скручивается и подтягивает за собой остальные слои кожи, которые лежат выше.

MIDIS

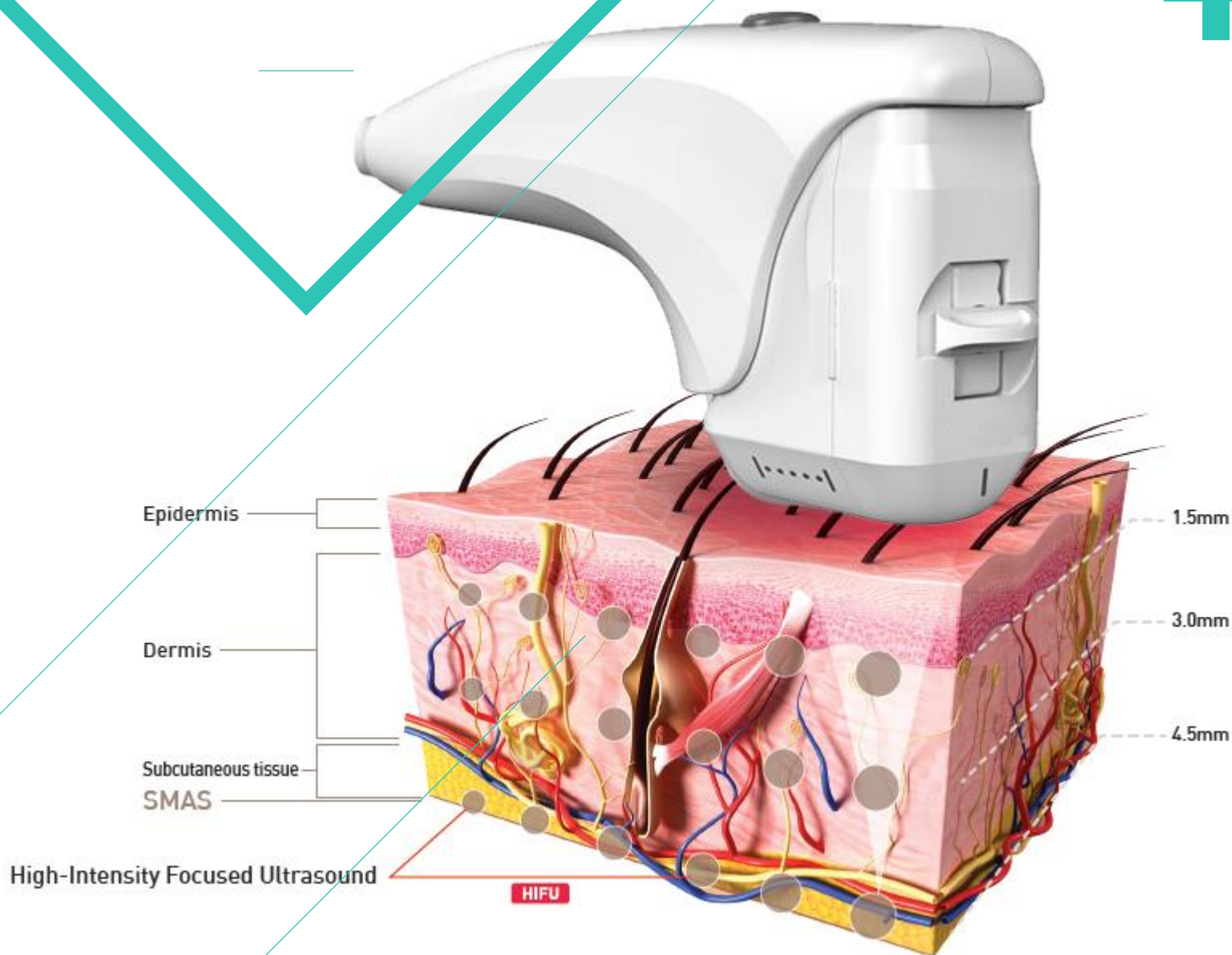

3D КАРТРИДЖИ



8 сменных картриджей для работы на 8 уровнях:


1.5 - Воздействует на дермальные слои. Формирует обновленный коллагеновый каркас, обеспечивающий здоровый и плотный тургор кожи.

3.0 - Воздействует на уровне ПЖК. Уменьшает объемы жировых пакетов, стимулирует выработку коллагена. Восстанавливает эластичность кожи, омолаживает ее, удаляет пигментацию, морщины, сокращает поры.


4.5 - Достигает глубины 4,5 мм и способствует подтягиванию линии SMAS. Воздействие обеспечивает необходимый эффект натяжения, сжатия и формирования мышечной ткани.

6,0/8.0/10.0/13.0/16.0 - На теле воздействие на подобной глубине оказывается на уровне ПЖК, создание «зон коагуляции» обеспечивает липолитический эффект.



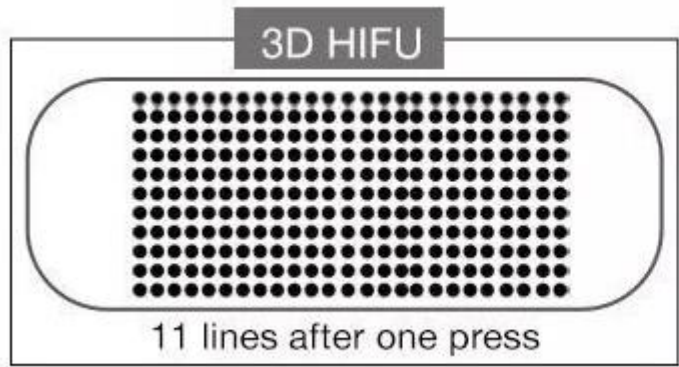


VS

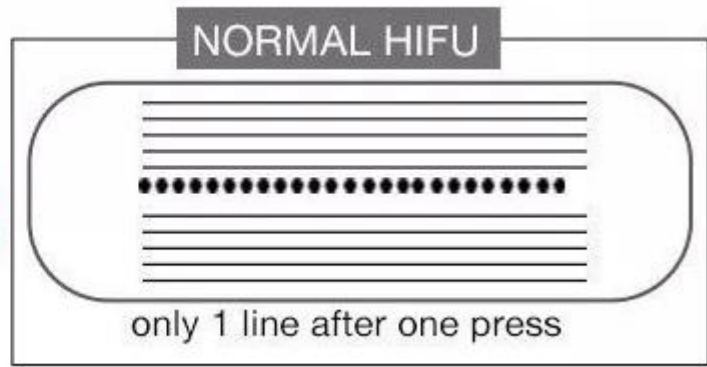

Новое поколение картриджей 3D работает не просто линейно, как в привычных аппаратах HIFU, а создает матрицу.

Оператор может управлять всеми параметрами на экране и выстраивать матрицу самостоятельно: регулировать расстояние между точками, длину каждой линии, и расстояние между линиями.

Таким образом при работе аппарат делает «линию за линией», как было задано на экране. Такой принцип работы делает процедуру более точной, в то время как в обычных аппаратах «шаг» может быть не точным, более быстрой и удобной при работе по телу.

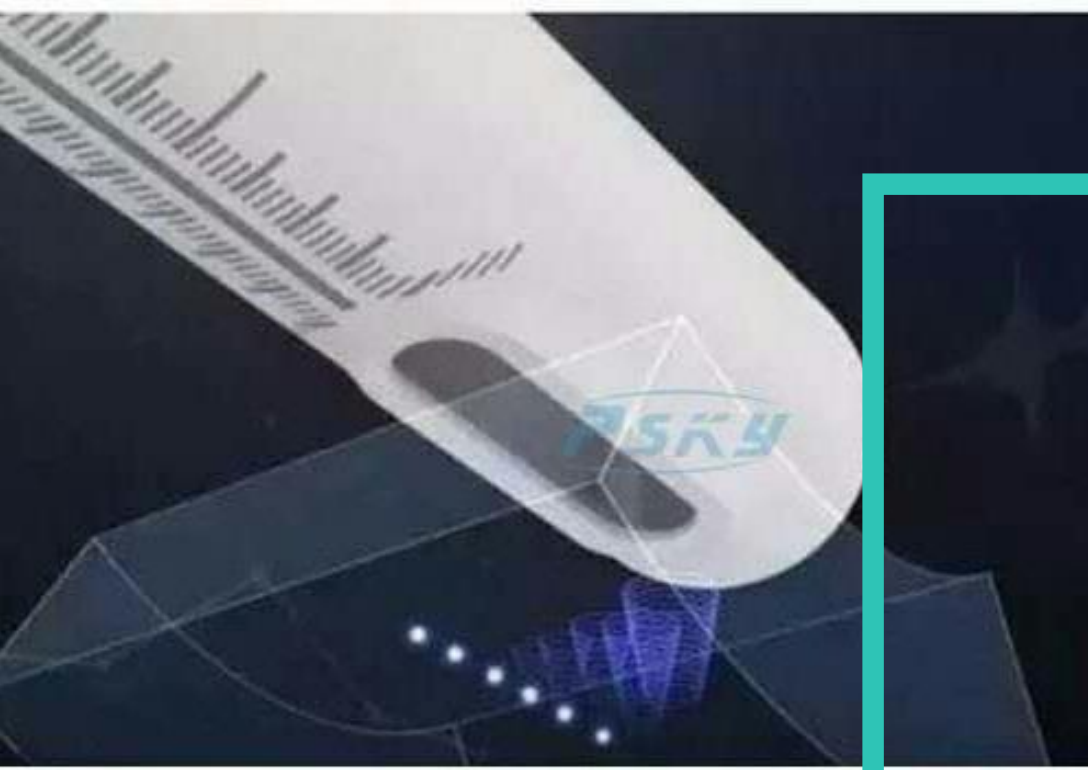


ПРИНЦИП HIFU DUAL VAGINAL

360°



Воздействуя ультразвуком на небольшие участки, аппарат вызывает кратковременный нагрев тканей до 65°C, при котором начинается рекомбинация старых коллагеновых волокон. Одновременно с этим происходит стимуляция слизистой оболочки и мышц.

Поскольку высокотемпературный ультразвуковой нагрев происходит на ограниченной площади и строго заданной глубине, окружающие ткани получают только стимулирующее воздействие и не подвергаются разрушению.


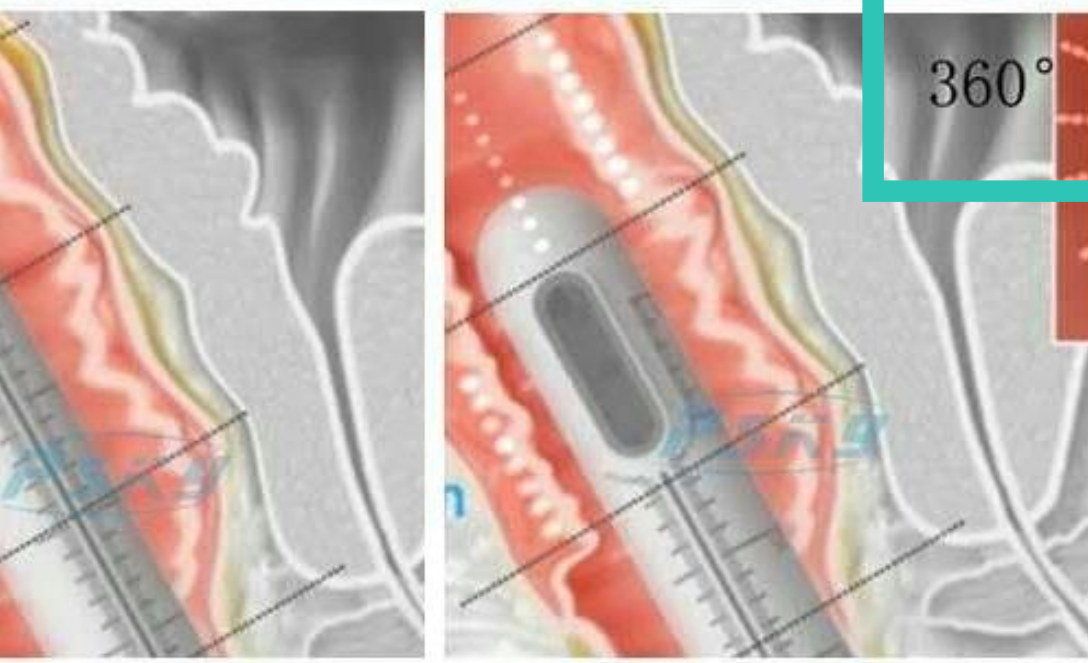


ВАГИНАЛЬНЫЕ КАРТРИДЖИ HIFU DUAL



В комплектации аппарата имеются 2 картриджа с глубиной проникновения 3,0 и 4,5 мм.

В зависимости от показаний, в одну процедуру могут применяться оба картриджа.

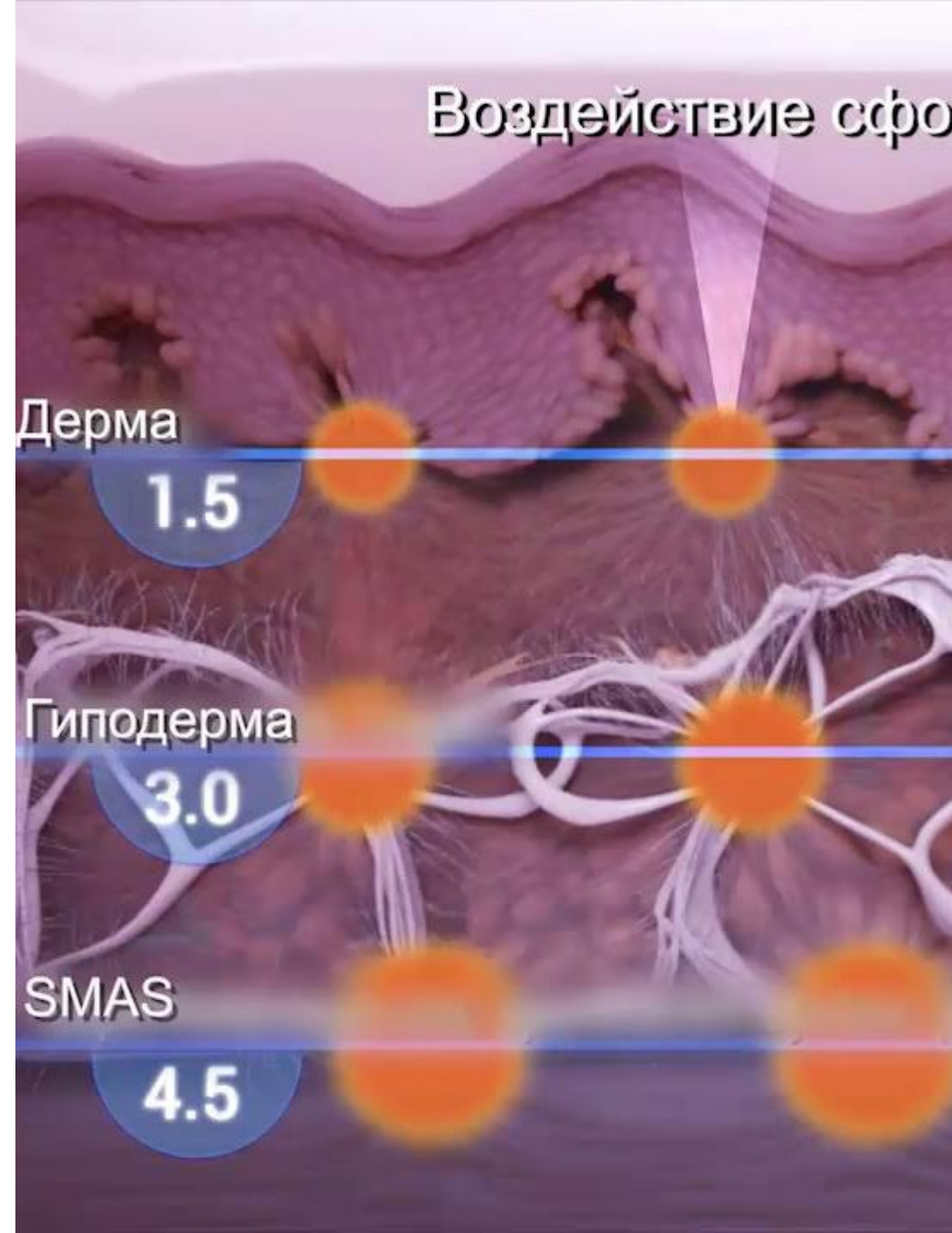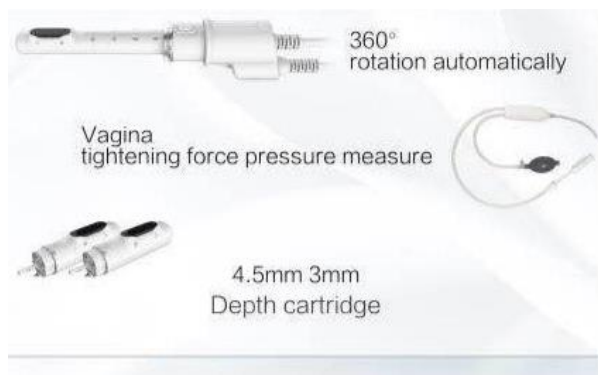

АВТО- УПРАВЛЕНИЕ

Благодаря специальному программному обеспечению, оператору необходимо выставить такие параметры, как угол поворота картриджа, энергия и расстояние между импульсами.

После запуска аппарат самостоятельно подает импульсы, и вращает картридж на нужный угол.



HIFU DUAL

ВАГИНОМЕТРИЯ

Важной функцией является дополнительная насадка для вагинометрии. Сужение влагалища происходит сразу после процедуры, и Вы можете измерить результаты сразу до и после процедуры.




HIFU DUAL

Преимущества метода HIFU не оспоримы:

- Результат заметен уже после первой процедуры
- Быстрый период восстановления после процедуры
 - Использование современной технологии - HIFU
 - Точная регулировка глубины воздействия.
- Безоперационный метод с высокой эффективностью
- Простота и удобство: всего 20 минут лечения дают мгновенный эффект.

MIDIS

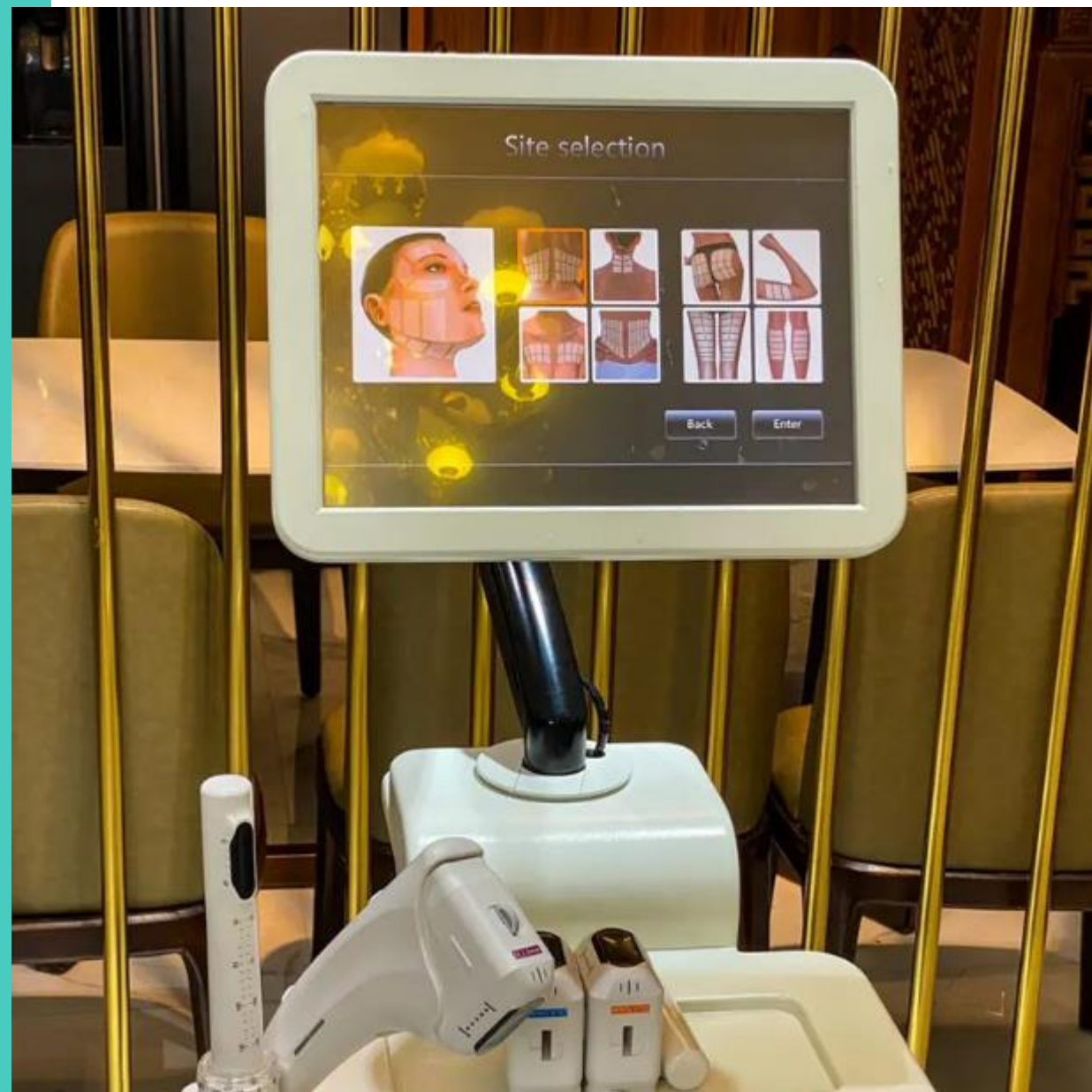

КОНТАКТЫ



MIDIS Medical Dermatology Systems

www.midis-centr.ru

«Центр Медицинской Косметологии «Мидис»

Сайт: <http://www.midis-centr.ru/>


www.coolite.ru

www.contlex.ru

Телефоны: +7 (495) 925-97-51

Адрес: ул. Коштоянца 20, корпус 2, Офис №5

@MIDIS_OFFICIAL

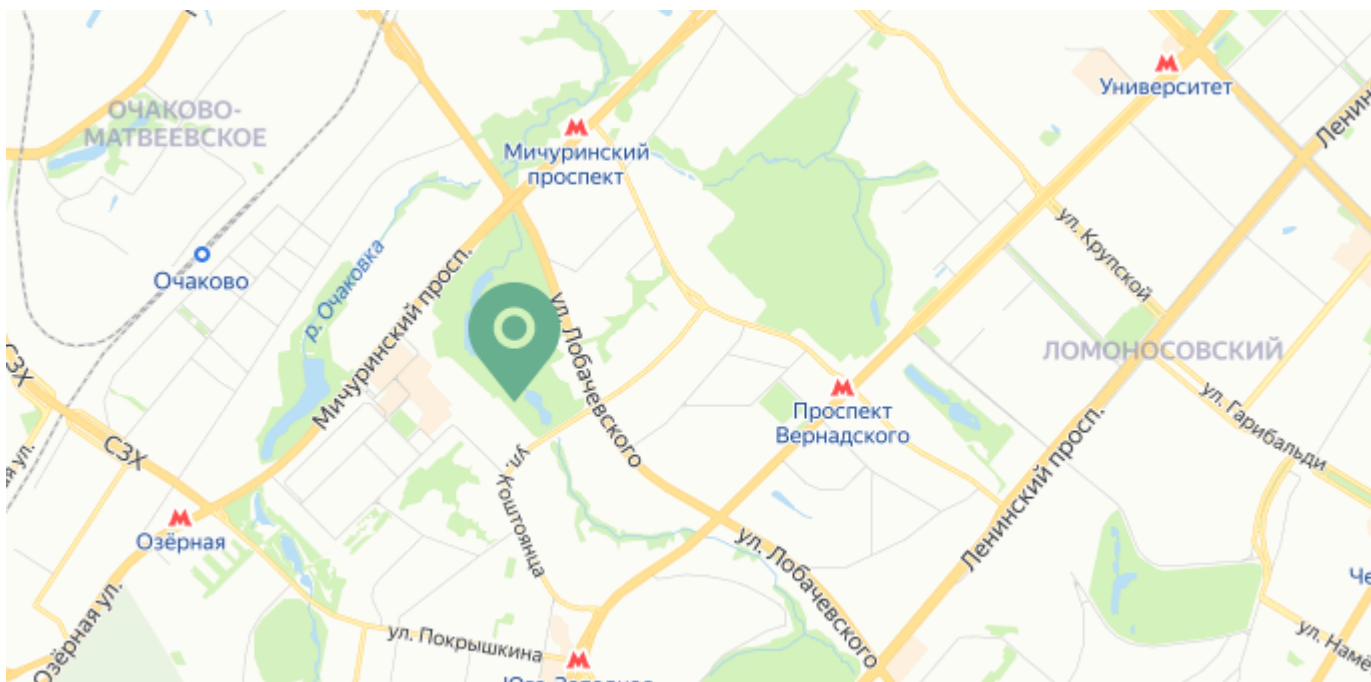

Центр МИДИС
Эксклюзивный
Дистрибьютор
Оборудования для
Салонов красоты и
Центров эстетической
Медицины

С 1991 года



ОБУЧЕНИЕ



СЕРВИС



РАССРОЧКА



ПОДДЕРЖКА