



# V 8

АППАРАТ ВАКУУМНО-РОЛИКОГО МАССАЖА  
RF И IR ТЕРАПИИ



## V8



**Косметологический аппарат V8-C1** применяется для коррекции фигуры, снижения массы тела, лечения и полного удаления целлюлита, подтяжки кожи, удаления морщин, разглаживания поверхности кожи при помощи вакуумно-роликового массажа, лицевой лифтинг и лифтинг в области глаз.

**Преимущества:**

**V8-C1** революционное сочетание биполярной радиочастоты, инфракрасного лазера, вакуума, вакуумно-роликового массажа



# ФУНКЦИИ + V8

**Аппарат V8** предназначен для массажа кожи. Процедура позволяет уменьшить целлюлит, улучшить контуры тела, подтянуть кожу на различных участках. Высокая эффективность этого метода объясняется одновременным воздействием четырех факторов:

- вакуумно-роликового массажа;
- инфракрасного излучения;
- биполярной RF-энергии (радиочастотной);

# МАНИПУЛЫ

---



Манипула 1

рабочая поверхность- 40mm x 66mm




Манипула 2

рабочая поверхность- 30mm x 44mm



Манипула 3

рабочая поверхность (три насадки)-  
4mm x 7mm, 6mm x 13mm, 8mm x  
25mm

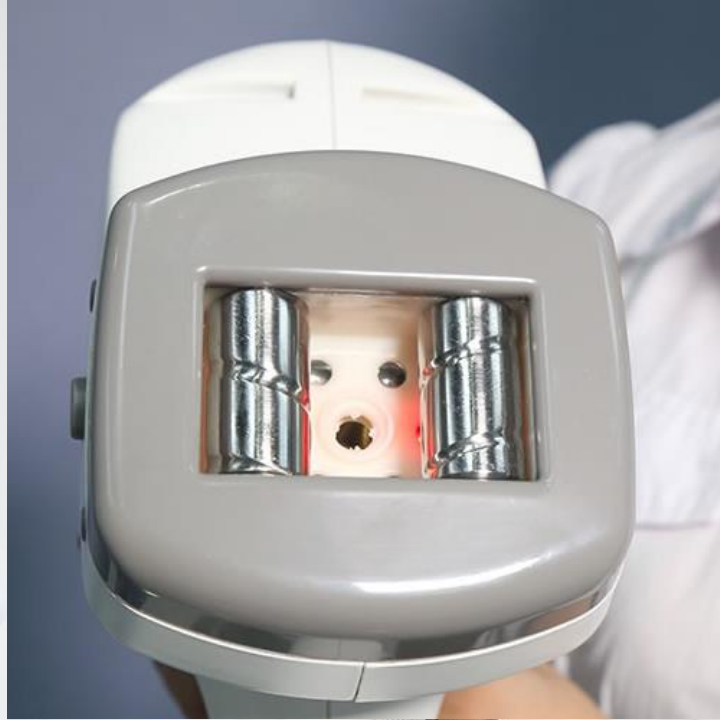

# МАНИПУЛА ПО ТЕЛУ 1

---

**Манипула №1:** сочетает радиочастотный и эндодермический массаж, обеспечиваемый вакуумом и роликами с механическим управлением, и инфракрасными лазерами. Эта манипула обладает рабочей поверхностью 40x60 мм и является идеальным для применения на широких участках, таких как живот, бедра и ягодицы. Манипула №1 оказывает липолитическое воздействие на жировые клетки, стимулирует циркуляцию крови и увеличивает лимфатический дренаж.

Манипула включает 4 силы воздействия:

- Вакуум
- IR
- RF
- Автоматические роллеры

Управление происходит с экрана аппарата или можно осуществлять управление на манипуле

MIDIS

## МАНИПУЛА ПО ТЕЛУ 2



**Манипула №2:** сочетает радиочастотный и эндодермический массаж, обеспечиваемый вакуумом и роликами с механическим управлением, и инфракрасными лазерами. Манипула №2 обладает рабочей поверхностью 30x50 мм и является идеальным для применения на небольших участках и верхних и нижних конечностях. Манипула №2 оказывает липолитическое воздействие на жировые клетки, обеспечивает реваскуляризацию зоны обработки и подтяжку кожи.

Манипула подходит для обработки области: рук, голени, живота.  
Манипула включает 4 силы воздействия:

- Вакуум
- IR
- RF
- Массажные роллеры (не вращаются)

Управление происходит с экрана аппарата или можно осуществлять управление на манипуле





## МАНИПУЛА ПО ЛИЦУ



Манипула включает 3 сменные насадки:

- Малая для зоны вокруг глаз (Вакуум + RF)
- Средняя для лица (Вакуум+ RF + IR)
- Большая для лица и зоны декольте (Вакуум+ RF + IR)





Tip 3



Tip 4



Tip 5



## СМЕННЫЕ НАСАДКИ МАНИПУЛЫ ДЛЯ ЛИЦА

**Манипула №3/1:** сочетает радиочастотный лифтинг, вакуумный массаж и инфракрасный лазер. Манипула №3 обладает рабочей поверхностью 8x25 мм и является идеальным для применения на лице, шее и области декольте. Манипула №3 обеспечивает реваскуляризацию зоны обработки и подтяжку кожи.

**Манипула №3/2/3:** сочетает радиочастотный лифтинг и вакуумный массаж. Манипула №3/2/3 обладает рабочей поверхностью 4x7 мм/6mmx13mm и является идеальным для применения на контурах глаз и губ. Манипула №3 обеспечивает эпидермальную реконструкцию, уплотнение коллагена и выработку нового коллагена.

Sign





# ПРИНЦИП РАБОТЫ

- Инфракрасное излучение сокращает сопротивление кожи, нагревает ее, а RF-энергия проникает внутрь соединительной ткани.
- Специально разработанные ролики и вакуум позволяют увеличить проникновение RF-энергии на 5–15 мм. Одновременно с этим ролики и вакуум механически втягивают и разминают соединительную ткань, эффективно удаляют подкожный жировой слой, экстрадируют капиллярную сеть, увеличивают метаболизм и лимфатический дренаж. В результате наблюдается улучшение контуров всего тела.
- Синергетическое сочетание RF-прогрева и инфракрасного лазера позволяет увеличить энергетический обмен в тканях и заполнить клетки кислородом благодаря прогреву.
- Методика формирования кожной складки при помощи вакуума позволяет RF-энергии проникнуть глубоко в кожу. В результате происходит воздействие только на кожную складку.



V 8

## ПОКАЗАНИЯ

- увеличение упругости кожи;
- коррекция фигуры после родов;
- уменьшение болезненных ощущений при артрите;
- подтяжка кожи (на спине, ногах, бедрах, ягодицах, плечах, руках);
- удаление морщин в области век;
- уменьшение мешков под глазами и улучшение контуров век;
- устранение темных кругов вокруг глаз;
- избавление от локальных жировых отложений;
- уменьшение объема талии, улучшение контуров тела;
- лечебный массаж.

# КОНТАКТЫ



«Центр Медицинской Косметологии «Мидис»


Сайт: <http://www.midis-centr.ru/>

## Телефоны:

+7 (495) 259-55-09

+7 (916) 112-54-89

**Адрес:** Москва, Павелецкая набережная, д.2, стр.2, БЦ "LoftVille"

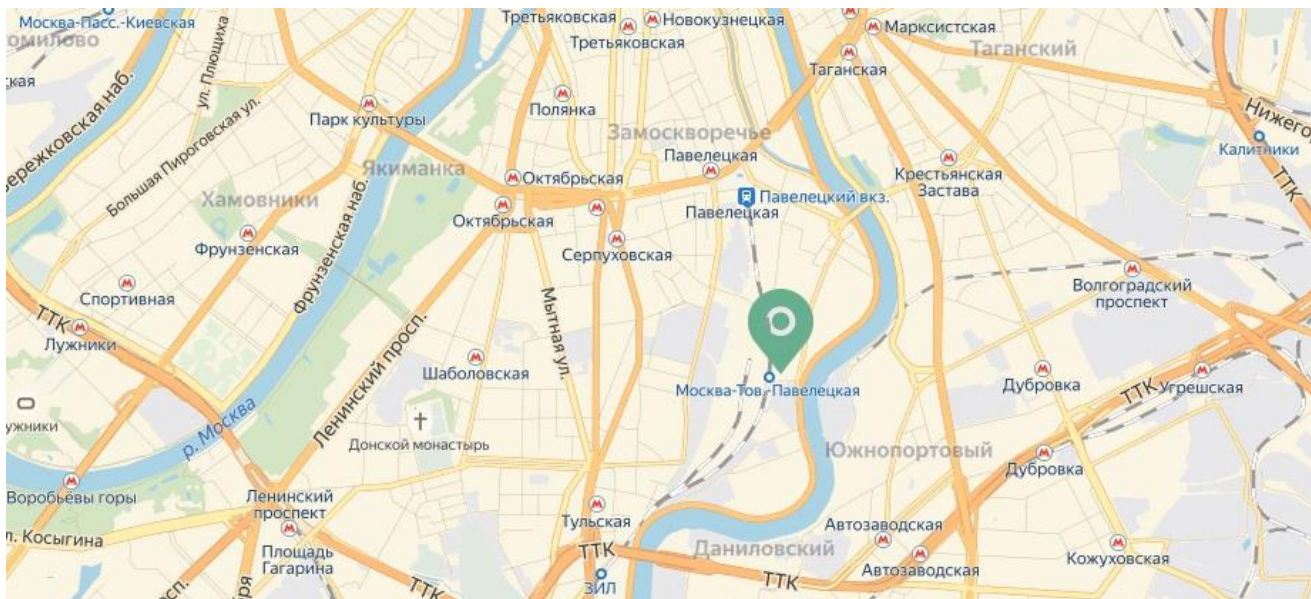

Все материалы презентации: включая текстовую, графическую и видео информацию, структуру и оформление страниц, защищены российскими и международными законами и соглашениями об охране авторских прав и интеллектуальной собственности (статьи 1259 и 1260 главы 70 "Авторское право" Гражданского Кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2006 года N 230-ФЗ). Все материалы запрещены к копированию!



Центр МИДИС  
Эксклюзивный  
Дистрибьютор  
Оборудования для  
Салонов красоты и  
Центров эстетической  
Медицины

С 1991 года

ОБУЧЕНИЕ

СЕРВИС

РАССРОЧКА

ПОДДЕРЖКА